

Produktinformation / datablad

Produktbetegnelse: Sharps Container, R-serie

Katalognummer: DP.10.50

Tilsigtet brug/anvendelse: Kanyleboks til stikkende og skærende affald, som for eksempel brugte kanyler, skalpeller og andre skarpe genstande. Produktet kan blandt andet bruges på hospitaler, klinikker og andre plejainstitutioner.

Produktnavn	Katalognummer	Billede (eksempel)
Sharps Container 5 liter, R-serie	DP.10.50	

Farve: Grå kanyleboks med gult låg.

Rengøring: Produktet er til engangsbrug.

Vægt og dimensioner:

Produktnavn	Brutto volumen (liter)	Netto volumen (liter)	Dimensioner (mm)	Top / bund diameter (mm)	Indkast- anordningen (mm)	Vægt (g)
Sharps Container 5 liter, R-serie	5	4,25	Ø200 x 241	200 / 162	80	342

Materiale/egenskaber: Produktet er lavet af polypropylen (PE), hvoraf 65% materiale. Materialet er brandbart, stik- og brudsikkert, skærefast og punktér frit.

Integreret i låget er der afmonteringsanordninger til for eksempel sprøjtekanyler og insulin pen kanyler samt en indkastanordning med åbning til stikkende og skærende materialer.

Produktet har en midlertidig og en permanent sikkerhedslukning. Efter monteringen af låget kan den ikke tages af.

Produktet har en maksimal påfyldningslinje.

Produktet har et håndtag, så det let kan flyttes.

Produkterne er støbt således at de kan stables.

Produktet er forsynet med et skrivebart felt.



Velegnet til autoklavering op til 121° C

Standarder:

UN 3291 (sikker bortskaffelse af farligt affald)
DQS GC ISO 23907-1:2019 (forebyggelse af stikskader)
ISO 9001 (kvalitetsledelsessystem)
ISO 14001 (kvalitetsledelsessystem for miljø)
ISO 45001 (kvalitetsledelsessystem for arbejdsmiljø)
ISO 13485 (kvalitetsledelsessystem med fokus på medicinsk udstyr)

CE-mærkning:

CE-mærket er ikke nødvendigt, da produktet ikke er et MD- eller IVD-produkt

Indeholder ikke:

PVC (DEHP, DBP, DIBP, BBP) og latex.

Holdbarhed:

5 år

Opbevaring:

Stuetemperatur / opbevares tørt / undgå direkte sollys

Affaldshåndtering:

Produktet skal den bortskaffes som klinisk affald.
Emballagen bør genbruges eller forbrændes.

Tilbehør

Holder med hank: DP.10.192
Vægholder: DP.10.211

Brugsanvisning:

Samling af kanyleboksen:

Læg låget på beholderen, og tryk på modsatte hjørner af låget (diagonalt) på samme tid, og gør det derefter på de øvrige to hjørner af låget. Tryk herefter på de midterste dele af låget. Der vil høres en lyd (klik) efter hvert tryk.



Under brug:

Åbningerne i låget er designet til bortskaffelse af tre typer farligt affald:

- Kanyler
- Insulin penkanyler
- Skalpeller og andre skarpe genstande

Det er vigtigt at bruge korrekt åbning.

Bortskaffelse af nåle:

For at fjerne nåle skal en af "V" udskæringerne bruges, og til insulin penkanyler skal "marguerit"-udskæringen bruges samtidig med at pennen bruges som en løftestang, når nålen skrues af.



Lukning af kanyleboksen:

Låget har to funktioner

- Midlertidige lukning
- Permanente lukning

For midlertidig lukning drejes det roterende låg med uret til sikkerheds-"tanden". For at åbne drejes mod uret.



Når beholderen er fyldt, lukkes den permanent ved at dreje låget med uret til positionen bag sikkerhedsenheden "tand". Der høres en lyd (klik) og låget er permanent lukket, og det er ikke længere muligt at åbne det.

Transport:

Når beholderen er permanent lukket og klar til bortskaffelse, kan beholderhåndtaget benyttes for lettere håndtering under transport.

Advarsler:

Brug ikke beholderen uden først at montere låget.
Forsøg ikke at fjerne genstande, der allerede er i beholderen.
Forsøg ikke at åbne beholderen, når den er permanent lukket.
Overhold den maksimale påfyldningslinje.

Forpakning:

Transportkasse	Materiale	FSC certificeret pap
	Farve	Naturfarvet
	Antal enheder (stk.)	5 liter: 26
	Størrelse i cm (l, b, h)	5 liter: 58 x 38 x 43
	Vægt i kg	5 liter: 10
Palle	Materiale	FSC certificeret pap
	Farve	Naturfarvet
	Antal enheder (stk. / kasser)	5 liter: 520 / 20
	Størrelse i cm (l, b, h)	5 liter: 120 x 80 x 235
	Vægt i kg (inklusive palle)	5 liter: 220



Symboler og forklaring:

	Klinisk risikoaffald, UN3291		E N 14126:2003+AC:2004 – Beskyttelse af dele af kroppen mod smitsomme stoffer (Type PB [6]-B)
	Må ikke genbruges / kun til engangsbrug		Samling / påsætning af låget
	Midlertidlig lukning		Permanent lukning

